

제품	코드명	내용		
	NG-101	Sheet	15.2cm x 12.7cm	1장/Box
	NG-101S	Strips	15.2cm x 2.5cm	4장/Box
	NG-301	Sheet	15.2cm x 12.7cm	1장/Box
	NG-301S	Strips	15.2cm x 2.5cm	4장/Box
	NG-301S1	Strips	15.2cm x 2.5cm	1장/Box
	NG-120	Areola Circles	7.2cm x 2.0cm	2장/Box
	NG-320	Areola Circles	7.2cm x 2.0cm	2장/Box
	NG-124	Lollypop	16.4cm x 7.2cm	2장/Box
	NG-324	Lollypop	16.4cm x 7.2cm	2장/Box
	NG-126	Anchor	25.4cm x 10.5cm	2장/Box
	NG-326	Anchor	25.4cm x 10.5cm	2장/Box
	NG-180	Dot	2.5cm x 2.5cm	6장/Box
	NG-380	Dot	2.5cm x 2.5cm	6장/Box
	NG-140	Ear	7.5cm x 7.5cm	2장/Box
	NG-340	Ear	7.5cm x 7.5cm	2장/Box
	NG-146	Nose	6.0cm x 7.0cm	2장/Box
	NG-346	Nose	6.0cm x 7.0cm	2장/Box
	NG-165	Abdomen	20.3cm x 5.1cm	1장/Box
	NG-365	Abdomen	20.3cm x 5.1cm	1장/Box
	NG-163	Abdomen	45.7cm x 5.1cm	1장/Box
	NG-363	Abdomen	45.7cm x 5.1cm	1장/Box
	NG-164	Abdomen	61.0cm x 5.1cm	1장/Box
	NG-364	Abdomen	61.0cm x 5.1cm	1장/Box
	NG-170	Large Blanket	61.0cm x 25.4cm	1장/Box
	NG-370	Large Blanket	61.0cm x 25.4cm	1장/Box
	NGO-800	NewGel+E Ointment	15g	1개/Box
	NGO-810	NewGel+E Ointment	30g	1개/Box

NewGel+ product, Spec. Rev. N, 2011.11.01

유효기간은 제조일로부터 3년이며 제품 외부 박스에 표기되어 있습니다.




NewGel+TM
 SCAR MANAGEMENT SOLUTION
 신개념 흉터개선용 젤 · 시트

흉터
이제 뉴 젤TM +로
개선하세요!
 Safe, Effective, Easy to use


 NewMedical Technology, Inc

310 Era Drive, Northbrook, Illinois 60062 USA
 TEL. (847) 412-1000 www.newmedical.com


 Science for Healthy Life 알로라이프

공식수입판매원 : (주)알로라이프
 서울시 강동구 천호대로 1078 CJ나인파크 3층
 TEL: 02)538-7390 www.allolife.com


 Science for Healthy Life 알로라이프

MADE IN U.S.A.

Safe, clinically proven methods to reduce, flatten, fade, and smooth scars.

NewGel+

뉴젤은 100% 의료 등급의 실리콘으로 만들어진 흉터개선용(scar treatment) 제품으로 부드럽고 자기점착력이 뛰어난 실리콘 젤 시트입니다. 뉴젤은 오래 있었거나, 최근에 생성된 비대성 흉터나 켈로이드성 흉터의 치료나 예방에 효과적인 제품입니다. 뉴젤은 FDA 승인을 받은 미국에서 직수입된 의료기기로 현재 미국 및 유럽의 병원에서 널리 사용되고 있습니다.

NewGel+ 흉터 개선 원리

뉴젤은 흉터부위를 공기의 노출로부터 막아주고, 습윤 환경(hydration)을 유지 시키며, 피부의 온도를 높여 흉터가 평평하고 부드럽게 개선될 수 있도록 도와줍니다.

NewGel+ 은 다음과 같은 흉터 관리에 이상적입니다.

흉터는 그 모양에 따라 가벼운 선상 흉터와 알개 파인 흉터, 두터운 비후성 흉터 그리고 체질에 따라 흉터가 확장되는 켈로이드 등 그 종류가 다양합니다.

- ▶ 켈로이드(Keloid)
- ▶ 비대성 흉터(Hypertrophic Scar)
- ▶ 외상(Trauma)
- ▶ 일반 수술(General Surgical)
- ▶ 화상(Burn)
- ▶ 성형 수술(Cosmetic Procedures)
- ▶ 제왕 절개(C-Section)
- ▶ 복부 수술(Abdominoplasty)
- ▶ 유방 재건(Breast Reconstruction)
- ▶ 기타 흉터 부위 및 수술 절개 부위



NewGel+ 주의사항

1. 개방형 상처, 아물지 않은 상처, 감염된 상처에 사용할 수 없습니다.
2. 수술 절개 부위는 실밥 제거 후 바로 사용하십시오.
3. 실리콘 젤에 민감한 환자의 경우 사용시 주의를 요합니다.
4. 가려움, 발진이 생기면 사용시간을 줄이거나 잠시 사용을 중단하고 상태가 호전된 후에 재사용 하시면 됩니다. 사용을 중단한 후에도 상태가 호전되지 않으면 전문의에게 상담을 받으십시오.
5. 샤워 또는 수영시에는 착용하지 마십시오.

NewGel+ 은 다음과 같은 두가지 종류가 있습니다.

베이지(Beige)

두껍고 내구성이 강하며, 피부와 유사한 색으로 보기 싫은 흉터를 가려 줍니다. 또한 세계에서 최초로 보호층 표면에 패브릭(원단)처리를 하여 자외선 차단 효과가 있으며, 잡스터(압박옷, 압박장갑 등) 착용시에도 밀리지 않습니다.

투명(Clear)

유연성이 매우 좋고, 외부 노출이 많은 얼굴이나 손 부위에 사용해도 제품 사용여부가 눈에 잘 띄지 않습니다.


NewGel+ 은 어떻게 사용하나요?

1. 사용 전 손을 씻은 후 흉터부위를 깨끗이 씻고 건조시킵니다. 그리고 포장지에서 뉴젤을 꺼낸 후, 깨끗한 가위로 흉터 부위보다 가로세로 양방향 1~2cm 크게 잘라내고 남은 제품은 트레이 안에 잘 보관합니다.
2. 흉터부위에 붙이기 전 뉴젤의 접착면에 붙어 있는 투명 필름을 벗겨냅니다.
3. 투명 필름을 벗겨낸 뉴젤은 제품의 점착면을 흉터부위에 맞춰 자연스럽게 부착합니다.
4. 뉴젤은 자기점착성이 있지만, 필요시 의료용 테이프나 다른 권고된 방법을 이용하여 보호할 수 있습니다. 단, 너무 조일 경우 피부자극의 원인이 될 수 있으니 주의를 요합니다. 하루에 최소 12시간 이상 매일 사용하고, 3~6개월 지속적으로 사용시 최고의 결과를 확인할 수 있습니다. 단, 민감한 피부를 가진 분은 처음 4일동안 하루에 4시간씩 부착하여 피부 적응상태를 확인한 후 매일 1시간씩 사용시간을 늘려가도록 합니다.
5. 사용 중 뉴젤 제품의 점착성이 먼지 또는 피지 등으로 현저히 떨어진 경우에만 물로 가볍게 씻어줍니다.
6. 물로 씻어준 뉴젤은 트레이에 올려 놓은 후 상온에서 자연스럽게 말려 재사용 하시면 됩니다. 사용 2~4주 후 뉴젤의 점착성이 사라지거나 제품이 허물어질 경우 새 제품으로 교체하여 주십시오.

NewGel+ 사용기간에 따른 흉터 개선 효과

뉴젤 사용 후 최소 3~7주 후에 흉터가 개선되는 것을 확인할 수 있으며, 최소 3~6개월 동안 하루 12시간 사용을 권장합니다.

유방 재건(Breast Reconstruction)

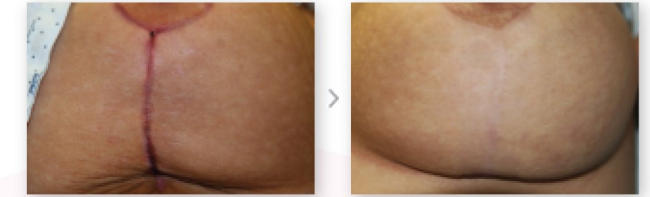

복부 수술(Abdominoplasty)



NewGel+E

뉴젤+E는 실리콘 젤 연고로 바르면 신속히 마르면서 피부에 밀착되는 얇은 실리콘막을 형성함으로 흉터를 보호하는 동시에 흉터가 개선될 수 있는 최적의 환경을 만들어 줍니다.

뉴젤+E는 흉터를 공기와 병원균으로부터 차단하고, 자체습윤환경을 만들어 흉터의 개선을 촉진시켜줍니다.

NewGel+E 사용방법

뉴젤+E는 급속건조되는 무자극성 의료용 실리콘 젤로서, 흉터를 얇고 부드럽고 흐리게 개선시켜 줍니다. 뉴젤+E에 추가된 Vitamin E 성분이 흉터를 부드럽고 촉촉하게 만들어 줍니다.

뉴젤+ 시트제와 연고제 제품은 동시에 함께 사용하지 않습니다. 다만, 최상의 효과를 얻기 위해서는 매일 뉴젤+ 시트제 제품을 사용하면서, 시트 제품을 사용하지 않는 시간에 뉴젤+ 연고 제품을 사용하시도록 권해 드립니다.